




## NÁVOD K POUŽITÍ




Správné používání Respisense monitoru velmi zvalnití Vaši zkušenost s tímto přístrojem. Přečtěte si prosím pozorně následující návod.

**DŮLEŽITÉ:** Před použitím monitoru si pozorně prostudujte návod • Návod uschovejte pro další potřebu po celou dobu životnosti monitoru • Používejte monitor s uvážením, jelikož nedokáže reagovat na veškeré dýchací problémy • Nepoužívejte k upevnění monitoru provizorní řemínky, jelikož tak můžete ohrozit zdraví Vašeho dítěte • Před každým použitím monitor zkontrolujte a pokud zjistíte poruchu, poškození nebo opotřebení, nepoužívejte jej • Monitor se smí používat pouze tam, kde opatrující osoba dobře uslyší poplachový signál • Monitor neotevírejte • Monitor neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem • Nepoužívaný monitor uchovávejte bezpečně z dosahu dětí • Obsahuje malé díly, které by mohly být při vjmutí pro děti nebezpečné • Části balení, které by mohly být nebezpečné pro děti, vyhodte • K oživení dítěte v některých případech může být nezbytné umělé dýchání a masáže srdce (CPR).

Dávejte pozor na velké venkovní pohyby, které by mohly monitor zmást, jako například jízda dopravním prostředkem nebo jízda dítěte v kočárku po nerovném povrchu nebo když se zapnutého monitoru dotýká zároveň jiná osoba. Za takových podmínek, zejména pokud je spuštěn mód vyšší citlivosti (viz Rady výše), nemusí být monitor schopen spolehlivě rozlišit pohyby dítěte od externích pohybů.

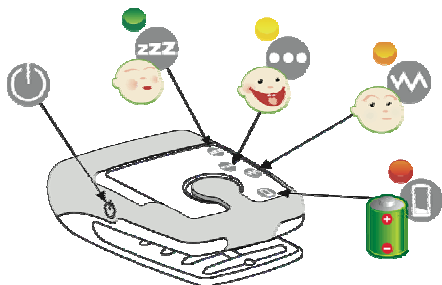

## PROVOZ

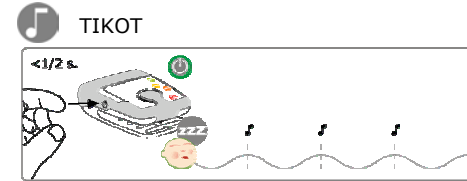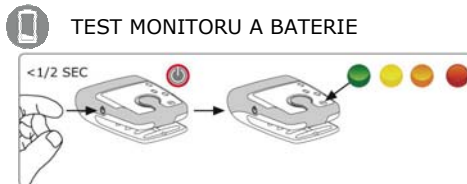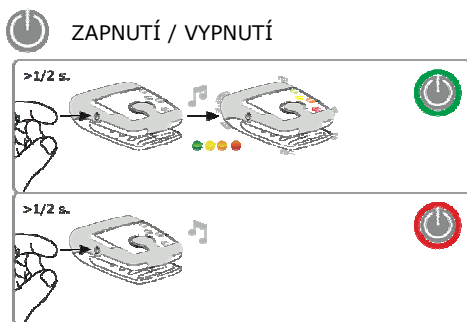


## INDIKÁTORY MONITORU




**Poznámka:** Nepoužívejte monitor na tlusté pásy, které mohou zdeformovat a případně poškodit sponku monitoru. Pokud dovolíte dítěti spát na boku, připevňte monitor spíše na stranu, na které dítě spí, aby se zajistil dobrý kontakt s bříškem dítěte a optimální provoz monitoru.

### Indikátory:

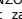- ZELENÉ světlo bude blikat, pokud monitor detekuje pravidelné pohyby, obvykle v době spánku dítěte.
- ŽLUTÉ světlo bude blikat, pokud se detekuje nepravidelný pohyb.
- ORANŽOVÉ světlo , označené "1", je indikátor alarmu a bude blikat za následujících podmínek: dotykový stimulator pracuje nebo je aktivován alarm nebo; pokud se dotykový stimulator aktivoval, ale do 5 sekund po aktivaci se obnovil pohyb, bude blikat ORANŽOVÉ světlo namísto ZELENEHO nebo ŽLUTÉHO.
- ČERVENÉ světlo je indikátor systémového varování a bude blikat, pokud jsou baterie již téměř vybité.

## FUNKCE MONITORU

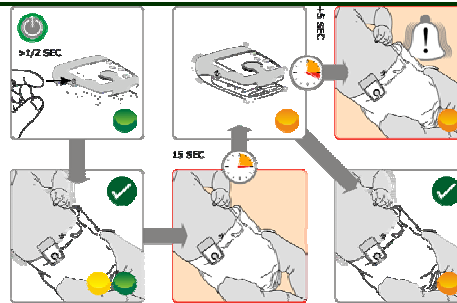

### Alarmy:

- Hlavní alarm (rychlý zvonivý tón) se spustí, pokud po 20 po sobě jdoucích sekund nebyl detekován žádný pohyb. Ačkoliv to může znamenat, že dítě potřebuje naléhavě pomoc opatrující osoby nebo zdravotního pracovníka, je nejlepší reagovat na tento alarm co možná nejlidněji. Nikdy s dítětem netřepějte!
- Vedlejší alarm (pomalý zvonivý tón) se spustí, pokud se dotykový stimulator aktivoval 6x, ale pokaždé se pohyb obnovil do 5 sekund. Může to znamenat, že monitor nebo penka nejsou optimálně připevněny nebo že je penka již příliš mokrá a odtahuje monitor od bříška dítěte nebo že se pohyb zastavil nebo je příliš mělký, aby bylo možné jej detekovat, ale po spuštění stimulace se obnovil. Pokuste se penku v pase připevnit pevněji, přebalte dítě nebo zkuste použít větší penku.
- Pokud se pohyb obnoví do 10 sekund od aktivace hlavního alarmu, alarm se resetuje. V opačném případě zůstane alarm aktivován až do vypnutí monitoru.

### Rady:

- Monitor vnímá pohyby bříška dítěte pomocí čidla citlivého na tlak, které je umístěno za zadní membránou. Pro zajištění spolehlivého fungování zapnutého monitoru je nutné, aby se jeho zadní strana neustále a celou plochou dotýkala bříška dítěte, obvykle kousek vedle jeho pupíku.
- Pokud používáte velmi tenké pleny, je dobré pro lepší pevnější upevnění monitoru vložit za okraj pleny kus látky. Pokud dojde k uvolnění monitoru během provozu, což je nepravděpodobné, přestane vnímat pohyby dítěte a spustí se poplach.

**Registrace Vašeho monitoru:** Zaregistrujte si prosím neprodleně Váš přístroj. Registrace monitoru Vám umožní nahrát fotografii Vašeho dítěte na webového fotobank Respisense. Získané informace jsou využity ke zlepšování výrobků a služeb společnosti Infantrust a nebudou nikdy použity pro šíření jakýchkoliv reklamních materiálů. Veškeré poskytnuté informace jsou chráněny interními předpisy společnosti Infantrust a nejsou dále šířeny, prodávány ani pronajímány. Registraci můžete provést na naší webové stránce [www.respisense.com](http://www.respisense.com).

**Použití zvukového/video monitoru (volitelné):** Zvuk alarmu na monitoru můžete přenášet i do jiných částí Vašeho domu, pokud si zvolíte tu nejvhodnější variantu z široké škály dětských monitorů v naší nabídce. Můžete si vybrat některý z jednoduchých zvukových monitorů, zvukových monitorů s video přenosem nebo zvukový monitor sledující také teplotu, které používají digitální nebo analogové technologie, s jedním, dvěma nebo více kanály, s napájením ze sítě nebo s dobíjecími bateriemi. Řiďte se pokyny pro daný typ přístroje a otestujte jeho instalaci, aby jste se ujistili, že budete schopni zaznamenat spuštění alarmu.

**Záruka:** INFANTRUST poskytuje na výrobek záruku 1 rok od data prodeje, pokud je toto datum alespoň jeden rok před "datem spotřeby" uvedeným na monitoru a jeho balení. Jelikož INFANTRUST nemůže nijak ovlivnit způsoby používání a uskladnění monitoru, nevztahuje se záruka na životnost baterií. Při každé reklamaci musí zákazník doložit doklad o koupi. Během záruční doby odstraní INFANTRUST jakékoliv poruchy monitoru způsobené vadou materiálu nebo vadou ve výrobě a monitor na své náklady vymění kromě nákladů na dopravu. Tato záruka se vztahuje na všechny státy, do kterých společnost INFANTRUST nebo jí pověřený distributor tento monitor dodává. Pokud byl monitor poškozen, otevřen nebo s ním bylo jinak manipulováno, záruka je neplatná.


Veškeré dotazy týkající se tohoto výrobku prosím nejprve směřujte na svého místního prodejce. Navštivte [www.respisense.com](http://www.respisense.com) a [www.respisense.cz](http://www.respisense.cz), kde naleznete nejaktuálnější informace a předvedení výrobku. Jakékoliv poznámky a návrhy můžete zasílat na [support@infantrust.com](mailto:support@infantrust.com).

## ÚDRŽBA

**Čištění:** Přístroj můžete očistit měkkou, vlhkou utěrkou. Monitor neoplahčujte ani jej nenamáčejte do žádné tekutiny a zabraňte nastříkání tekutin do otvorů přístroje. Proniknutí tekutiny do přístroje znamená zneplatnění záruky. Na čištění nepoužívejte žádné chemikálie, protože mohou podráždit pokožku dítěte. Chraňte reproduktor před zanesením špinou či prachem, který by mohl utlumit zvuk alarmu.

### Výměna baterie:

Varování: Oheň a riziko popálení. Nedobíjejte, nedemontujte, nezahřívejte nad 100 °C nebo nespalujte. Udržujte z dosahu dětí. Udržujte v originální obalu, dokud nebudete přístroj používat. Použité baterie okamžitě odstraňte. Nikdy nevklaďte baterie do úst. Vyvarujte se ukládání na přímém slunečním záření, vysokých teplotách nebo vlhkosti. Předjeďte opocení.

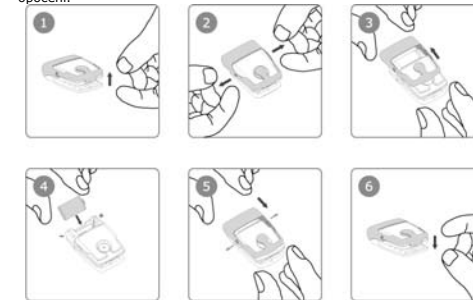

Navrženo a vyrobeno v Jihozápadní republice společností Infantrust Parenting Solutions (Pty) Ltd., PO Box 3316, Matieland, 7602, Jihozápadní republika.

Přiznané patenty ZA2006/01793 a GB2419961. Další patenty jsou v mezinárodně v procesu schvalování.

Všechna práva vyhrazena; Respisense, Infantrust, TummyTickle a příslušná loga představují obchodní značky.

**Vymezení zodpovědnosti:** Tento dětský monitor je pomůcka pro rodiče a ne zdravotní přístroj či náhrada za opatrující osobu. Je určen k provozu v bezpečných podmínkách a musí se používat zodpovědně a v souladu s podrobným návodem v tomto manuálu. Tento přístroj není vhodný k detekci obstrukční apnoe. Diagnózu a sledování této nemoci by měl provést profesionální zdravotnický pracovník. Předčasně narozené a jinak rizikové děti a děti, u kterých je známá predispozice k apnoe, by měly být pod dohledem lékaře. Tento výrobek nedokáže reagovat na veškeré dýchací problémy a není určen k použití současně s kyslíkovým přístrojem. Zákazník používá tento monitor na své vlastní riziko a společnost Infantrust Parenting Solutions (Proprietary) Limited, její zaměstnanci, prodejci, smluvní pracovníci, výrobci, distributoři a společníci nenesou žádnou odpovědnost za ztrátu, škodu či poranění, včetně nepřímé ztráty, škody či poranění, které utrpí zákazník nebo jiná osoba v důsledku jakékoliv poruchy (zjevné či skryté) na tomto monitoru a veškeré záruky, výslovné, implicitní či nevyslovené, a jakákoliv jiná odpovědnost s jakoukoliv příčinou se tímto výslovně vylučují a zákazník se tímto zavazuje odškodnit společnost INFANTRUST a zprostit ji jakékoliv takové odpovědnosti.

### Technické specifikace:

Napájení Respisense 3.6V Lithium baterie  
Hlavní alarm rychlý zvonivý tón 2.7kHz  
Vedlejší alarm pomalý zvonivý tón 2.7kHz  
Test při zapnutí testuje vnitřní bezchybnost a stav baterií a aktivuje všechny výstupní módy pro kontrolu uživatelem.

Ve snaze vylepšovat monitory Respisense se jejich vzhled a specifikace mohou být ohlášení měnit.