

Kompresorový inhalátor 3033 Mini

San-Up inhalátor pracuje na bázi kompresoru, který pomocí tlaku vzduchu přeměňuje léčebný roztok (farmaka) v mlhu. Drobné částice z takto rozptýlené mlhy se ukládají do plic a následně mají rychlý účinek, který je dosažen s minimálním či žádným vedlejším účinkem. Tento přístroj pracuje s tlakem 50 – 106 kPa, který dodá potřebný tlak k rozptýlení farmak do malých částic majících za následek účinnost procedury.

Tento model pracuje na kompresorovém systému, který je jednoduchý pro užívání: není potřeba žádné vody, vše co je potřeba udělat je nalít léčebný roztok (farmaka) do zásobníčku na farmaka a inhalátor je připraven k užívání. Moderní design, elegantní vzhled a malé rozměry připomínají malý cestovní kufřík, tudíž je tento inhalátor vhodný i pro cestování.

Kompresorový inhalátor 3033 Mini – je určen pro inhalaci léčiva v případě astma, chronické bronchitidy a jiných respiračních onemocnění. Tento přístroj je vhodný pro všechny běžně používané inhalační roztoky. Používejte pouze množství a druh předepsaný Vaším lékařem. Inhalátor může být použit pouze pro účel aerosolové terapie. Jakékoliv jiné užití je nevhodné a tudíž i nebezpečné. Výrobce se necítí být odpovědným za škody způsobené nesprávným, nevhodným užitím, anebo pokud je přístroj užíván bez souladu s bezpečnostními normami.

Důležité bezpečnostní opatření:


- Přečtěte si prosím pozorně návod k použití před prvním použitím přístroje a ponechte si ho pro pozdější použití.
- Zamezte kontaktu s vodou.
- Přístroje se nedotýkejte mokřýma či vlhkýma rukama.
- Nepoužívejte při extrémních klimatických podmínkách.
- Nepoužívejte přístroj v přítomnosti snadno zápalných těkavých látek.
- Snažte se, aby otvory pro vzduchovou ventilaci kompresoru byly vždy průchozí.
- Před čištěním či údržbou odpojte přístroj z el. sítě. Odpojte jej i když přístroj nepoužíváte.
- Neotvírejte přístroj, jestliže je v provozu.
- Nenechávejte farmaka uvnitř zásobníčku jestliže inhalátor neuvžíváte.
- Nenalévejte více jak 5 ml roztoku.
- Položte přístroj na vodorovnou plochu. Nikdy jej nezapínejte, jestliže se cítíte ospale či unaveně.
- Nepokládejte inhalátor do vody.
- Maximální doba provozu je 30 minut. Poté je potřeba nechat přístroj 30 minut v klidu.
- Nosní a ústní hubice jsou pro osobní užívání, a neměly by být sdíleny s jinými osobami.
- Zastavte inhalátor jestliže cítíte jakoukoliv nevolnost.
- **Děti smí používat přístroj pouze pod dohledem dospělé osoby.**
- **Tento přístroj smí být opraven pouze autorizovaným prodejcem.**

Poznámka:

V přístroji je zabudovaná tepelná pojistka, která přístroj vypne v případě možnosti přehřátí.

Návod k použití:

- 1) Sestrojte díly tak jak je vyobrazeno na obrázku. (Pediatric mask – dětská maska; Adult mask – dospělá maska; Jet nebulizer – zásobníček na farmaka; PVC tubing – umělohmotná hadička; A – nástavec; B – násavec do nosu; C – náustek).
- 2) Odšroubujte kryt zásobníčku na farmaka proti směru hodinových ručiček (Fig. 1). Vyjměte ze zásobníčku na farmaka šedý střed a nakapejte do zásobníčku max. 5 ml farmak.
- 3) Sestavte díly zpět a našroubujte kryt zásobníčku po směru hodinových ručiček.
- 4) Nasadte zásobníček na farmaka na hadičku a na zásobníček nasadte požadovaný díl (obrázky A, B, C; Fig. 5; Fig 6). Druhý konec hadičky nasadte do přístroje (Fig. 4).
- 5) Zkontrolujte aby tlačítko O/I bylo v poloze O. Zapojte přívodní kabel do zásuvky.
- 6) Zapněte inhalátor stisknutím tlačítka O/I na horní straně inhalátoru a můžete inhalovat. Pokud Vám dojde farmaka a chcete pokračovat v inhalaci, vypněte přístroj a nalijte nové farmaka. Zapněte inhalátor a pokračujte v inhalaci.
- 7) Nezapomeňte, že délka jedné inhalace nesmí přesáhnout 30 minut. Po této době je nutné přístroj vypnout a nechat jej 30 minut v klidu.
- 8) Pro ukončení inhalace vypněte přístroj, vypojte kabel ze zásuvky a důkladně umyjte použité příslušenství.
- 9) Skladujte Váš inhalátor v originálním balení.

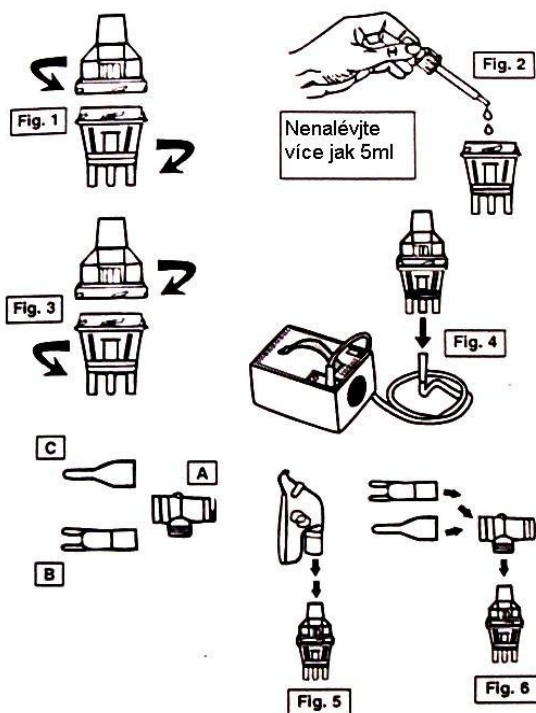

Čištění a údržba:

Důležité: Před prvním použitím přístroj omyjte a dále jej čistěte vždy po každém užití, a to následujícím způsobem: umyjte všechny díly kromě vzduchového filtru a teplotu ne však horkou vodou s trochou mýdlového roztoku. Poté opláchněte důkladně teplou čistou vodou.

Jednou za měsíc ponořte díly do misky obsahující 3 díly teplé vody a 1 díl octa na dobu 30 min., dezinfekční prostředek je možné též užit.

Umyjte si ruce a vyndejte předměty z dezinfekčního roztoku, opláchněte teplou vodou a nechte je oschnout. Poté dejte díly do uzavřeného sáčku. Nevysušujte je bavlněnou utěrkou.

Varování: Abyste zamezili infekcím, doporučujeme, abyste čistili díly po každém užití. Užívejte pouze roztoky předepsané doktorem, pečlivě dodržujte jeho instrukce. Nepoužívejte žádné balzamované nebo aromatické substance.

V žádném případě nesmí být díly ponořeny do vařící vody.

V žádném případě nerozebírejte přístroj. Uvnitř přístroje jsou pouze díly, které smí opravovat pouze kvalifikovaná osoba.

Výměna vzduchového filtru:

1. Vzduchový filtr by měl být vyměněn je-li špinavý či poškozený.
2. Uchopte pevně víčko od filtru (víčko od filtru je s otvory) a vytáhněte opatrně celou jednotku.
3. Vyměňte špinavý filtr pomocí např. pinzety.
4. Vložte čistý a nový San-Up filtr.
5. Zamáčkněte víčko s novým čistým filtrem zpět do původní pozice.

Upozornění:

Nepoužívejte bavlnu nebo jiný materiál. Neumývejte, ani filtr nečistěte. Používejte pouze San-Up filtry. Nespouštějte přístroj bez filtru.

Příslušenství

1 maska pro dospělé, 1 maska pro děti, 1 vzduchový filtr a 3 náhradní, 1 náustek, 1 PVC hadička, 1 zásobníček na farmaka, 1 návod k použití, 1 samotný přístroj, 1 záruční list.

Tabulka poruch:

Problém	Možná příčina	Jak ji odstranit
Po zapnutí přístroj nepracuje.	1. Špatně připojeno na el. síť. 2. Chybí el. energie.	1. Ověřte připojení na el. síť. 2. Zkontrolujte el. energii (možné vypnutí el. energie).
Nevychází žádná mlha.	1. Málo farmak v zásobníčku. 2. Příliš velké množství farmak. 3. Odpojená hadička.	1. Dolijte farmaka max. 5 ml. 2. Odstraňte přebytečná farmaka. 3. Připojte správně hadičku.
Vychází méně mlhy.	1. Vzduchový filtr je zanesený. 2. Zásobníček je špinavý.	1. Vyměňte za čistý filtr. 2. Vyměňte za nový.

Přehled certifikátů pro kompresorový inhalátor 3033 Mini:



ISO 9001 Quality Systems (International)



93/ 42/ CE Directive (European Community)

FDA

510 (k) (USA)



(Australia -New Zealand)

A.N.M.A.T. (Argentina)



(Argentina)

TECHNICKÁ DATA:

Druh inhalátoru:	Kompresorový inhalátor
Napětí:	220 V /50Hz
Příkon:	0,6A
Třída bezpečnosti:	II typ B
Rozprašovací výkon:	0,2 ml/ min.
Provoz / přestávka:	30 minut / 30 minut
Velikost částic léků:	< 5,0 μm (MMAD 3,3 mikronu)
Objem zásobníku:	5 ml
Příslušný max. tlak:	2,3 kg / cm ²
Hmotnost:	1,6 kg
Rozměry (d. š. v.):	175 x 130 x 96 mm
Provozní teplota:	5°C až 40°C při 30 – 95% relativní vlhkosti
Skladovací teplota:	-10°C až 40°C při 10 – 95% relativní vlhkosti
Maximální tlak:	225,56 kPa (2,3 kg/cm ²)
Rozsah tlaku:	50 - 106 kPa

Důležité bezpečnostní upozornění:

Kompresorový inhalátor SAN-UP 3033 Mini je elektrické zařízení. Nesmí být použit v prostorách s rizikem výbuchu nebo ve velkém vlhku.



Výrobek likvidujte odevzdáním na místo zpětného odběru.
Výrobek ani jeho příslušenství nepatří do běžného domovního odpadu!
Papír odevzdejte na sběrné místo.

ZÁRUKA:

Záruka na kompresorový inhalátor SAN-UP 3033 Mini je 24 měsíců od zakoupení přístroje. Záruka se vztahuje na přístroj. Nevztahuje se na poškození vzniklá nesprávným zacházením, nehodami, nedodržováním návodu k použití, případně změnami provedenými na přístroji třetí osobou. Záruka se poskytuje pouze po předložení prodejcem řádně vyplněného záručního listu a nejsou-li poškozeny kontrolní plomby.



Výhradní distributor v ČR:

BONECO CR, s. r. o., Viktorinova 80, 588 13 Polná

Tel./ fax: 567 212 396, 774 162 396, 777 163 396

e-mail: Info@boneco-cr.cz

www.boneco-cr.cz